



KASSEN-
LEISTUNG

GLASKLARE VORTEILE

Davon können Sie und Ihre Patienten profitieren:

- + Hohe Biokompatibilität
- + Dauerhafte Passgenauigkeit
- + Äußerst natürliche Transluzenz
- + Sehr hohe Bruch- und Biegefestigkeit
- + Reproduzierbar
- + Hoher Tragekomfort: geschmacksneutral
- + Modernste digitale CAD/CAM Fertigungstechnologie
- + Resistent gegenüber Plaqueablagerungen
- + Einfache Handhabung und Reinigung
- + 6 Monate Garantie

SMILODENTAX  
SPEZIALISTEN FÜR GÜNSTIGEN ZAHNERSATZ

Kontakt

smilodentax GmbH

Witzlebenstraße 15 · 45472 Mülheim an der Ruhr

T 0208 / 74050 0 · F 0208 / 74050 296
info@smilodentax.de · www.smilodentax.de

SMILODENTAX  
SPEZIALISTEN FÜR GÜNSTIGEN ZAHNERSATZ

SD BIO KOMFORTSCHIENE EINE GLASKLARE EMPFEHLUNG FÜR DEN PERFEKTEN BISS



SD BIO KOMFORTSCHIENE

Die SD Bio Komfortschiene ist eine CAD / CAM gefertigte Schiene der neuesten Generation aus restmonomerfreien PMMA Hochleistungskunststoff.


Im Unterschied zu herkömmlichen Aufbissschienen, kennzeichnet die SD Bio Komfortschiene höchste Präzision, Passgenauigkeit und beste Materialeigenschaften. Die aus glasklarem, formstabilem Material gefertigte Schiene kann auf Basis von Gipsmodellen oder intraoralen Scans individuell gefertigt werden.

**VIELSEITIG
&
PRÄZISE**

INDIKATIONSÜBERSICHT

Die SD Bio Komfortschiene wird bei vielen Erkrankungen erfolgreich eingesetzt:

- Myoarthropathie (MAP)
- Craniomandibuläre Dysfunktion (CMD)
- Temporomandibuläre Dysfunktion (TMD)
- Costen-Syndrom
- Bruxismus

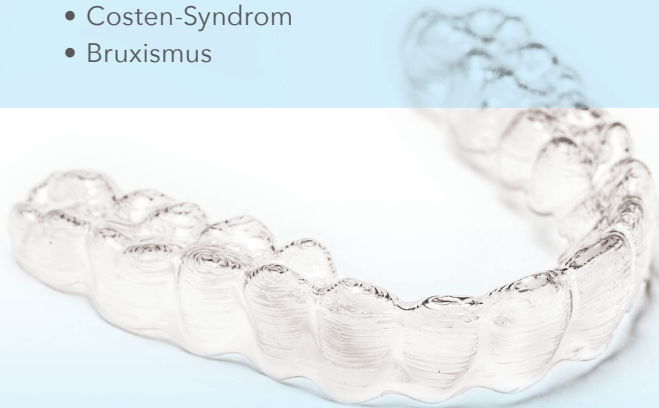

SO FUNKTIONIERT'S

Abformung.

Zur individuellen Anfertigung senden Sie uns die Abdrücke, einen Biss oder den intraoralen Scan von Ober- und Unterkiefer Ihres Patienten.

Modellherstellung und Scan

Die im Dentallabor hergestellten Modelle werden für die virtuelle Simulation mit hochmodernen Scannern erfasst.

Virtueller Artikulator Simulation

Für ein perfektes Ergebnis werden die Kiefergelenksbewegungen mit den Scandaten am virtuellen Artikulator simuliert.

Fertigung

Die SD Bio Komfortschienen werden auf 5-Achs-Simultanfräsmaschinen aus hochwertigem Biosplint Blanks gefräst und anschließend aufpoliert.

Behandlung

Dank exakter Bisseinstellung und Eckzahnführung per Mittel- oder Vollwertartikulator-Simulation profitiert Ihr Patient von perfekter Passgenauigkeit.

Die Produktions- und Lieferzeit für die SD Bio Komfortschiene beträgt 6-8 Werktage.